



'Bij Pieter de Boer is uw voet in goede handen'

U bent vandaag misschien voor het eerst bij een orthopedische schoenmaker geweest voor het aanmeten van (semi)orthopedische schoenen. Middels dit formulier wil ik u informeren over de procedure voor het maken van de schoenen.

Bij uw eerste bezoek aan de schoenmaker wordt uw voet opgemeten en zonodig een gipsafdruk gemaakt. Met deze gegevens wordt er een mal van de voet gemaakt met de benodigde voorziening. Dit duurt ongeveer twee weken.

Na twee weken wordt dit bij u gepast door middel van een plastic schoen. Als er gepast is wordt de mal zonodig nog iets gecorrigeerd waarna de definitieve schoenen worden gemaakt. Dit duurt ongeveer 4 à 5 weken.

Bij het afleveren van de definitieve schoenen moet de verschuldigde eigen bijdrage worden voldaan.

Wanneer u voor het eerst (semi) orthopedische schoenen gaat gebruiken moet u er rekening mee houden dat het wel twee à drie weken kan duren voordat de schoenen "lekker" zitten. Dit houdt in dat u ze niet gelijk vanaf de eerste dag de hele dag kunt gebruiken.

De eerste dag houdt u ze een uur aan, de tweede dag twee uur en de derde dag drie uur enz.

Zo probeert u ze iedere dag iets langer aan te houden.

Ook is het belangrijk dat als het gevoel in de voeten niet goed is u iedere keer als u de schoenen uitdoet de voeten controleert op drukplekken.

Onderhoud van uw orthopedische schoenen.

Net als confectieschoenen moeten orthopedische schoenen goed onderhouden worden. Daarom heeft De Boer Orthopedie een aantal belangrijke tips voor u op een rijtje gezet:

- Zorg bij het aantrekken van de schoenen dat de hiel van de voet goed achterin de schoen zit, dan de veters goed vaststrikken.
- Gebruik bij het aantrekken van lage schoenen een schoenlepel.
- Minimaal een keer per week de schoenen poetsen. Dit houdt het leer soepel en zorgt dat het leer in goede conditie blijft.
- Suede schoenen kunt u af en toe opborstelen met een suede blok. Ook kunt u ze inspuiten met waterafstotende spray.
- Nubuck kunt u af en toe een beetje opschuren met een nubuck schuurblokje.
- Vetleer kunt u af en toe invetten met kleurloze schoenvet.
- Natte schoenen nooit bij een warmtebron laten drogen. Gewoon de schoenen volstoppen met krantenpapier en op kamertemperatuur laten drogen.

U krijgt van de schoenmaker ook een beperkte garantie op de geleverde schoenen. Dit houdt in dat er garantie gegeven wordt van 3 maanden op de pasvorm mits de voet niet verandert en 6 maanden op materiaal behalve op ritsen.

Bij De Boer Orthopedie is een klachtenregeling opgesteld. Mocht u niet tevreden zijn over de gang van zaken, kunt u gebruik maken van deze regeling.

Gebruiksaanwijzingen voor inlays

U bent vandaag bij de orthopedisch schoenmaker geweest voor het aanmeten van inlays. Deze zijn over een week klaar.

Wanneer u nieuwe inlays heeft gekregen moet u er rekening mee houden dat u hier ook aan moet wennen.

Het is daarom verstandig om deze inlays niet gelijk de hele dag te gebruiken.

U kunt het beste de eerste dag de inlay een uur gebruiken, de tweede dag twee uur en de derde dag drie uur.

Dit is een algemene stelregel. U hoeft zich niet perse aan dit schema te houden.

De bedoeling hiervan is om te zorgen dat u probeert om de inlay iedere dag iets langer te gebruiken zonder onnodige pijnklachten.

Indien u de inlays na twee à drie weken nog niet de hele dag kunt gebruiken zonder pijnklachten of als u andere pijnklachten heeft gekregen moet u weer een controle-afspraken maken met de orthopedische schoenmaker.

De inlays vragen geen speciaal onderhoud. Als u veel last heeft van transpiratie is het verstandig om, als u de schoenen niet gebruikt, de inlays even uit de schoenen te halen zodat ze kunnen drogen (bv. 's avonds).

De inlays niet op een warmtebron laten drogen.

